

Yleiset hoito-ohjeet

Antidecubituspatjat ovat pitkäikäisiä tuotteita. Patjojen asianmukaisella hoidolla varmistetaan niiden pitkä käyttöikä. Seuraaviin kolmeen toimenpiteeseen tulee kiinnittää erityistä huomiota patjojen huollossa:

1. Käännä patja säännöllisin väliajoin ympäri pituussuunnassa

Patjaan kohdistuu suurin rasitus hartijoiden kohdalle. Patja on suunniteltu kestämaan painoa, mutta patjan ominaisuudet (lämpöön ja painoon reagoiminen) säilyvät parhaiten, kun patja pääsee säännöllisesti palautumaan.

2. Huolehdi sängyn pohjan ja patjan välisestä ilmanvaihdosta

Kun sängyn pohjan ja patjan välinen ilmanvaihto toimii, ei patja pääse kostumaan. Hoitosängyt, joissa on nk. ritiläpohja, tuulettuvat hyvin ja pitävän patjan alaosan kuivana. Mikäli sängyssä on nk. umpipohja, tulee patjan ilmanvaihtoon kiinnittää erityistä huomiota.

Jos näyttää siltä, että patja pääsee kostumaan alpinnaltaan, tulee huolehtia sen tuulettumisesta säännöllisesti nostamalla patja esim. pystyyn sänkyä vasten. Päällisen vetoketjun avaaminen nopeuttaa tuulettumista.

Huomio lisäksi, että sängyn on oltava kuiva, kun patja asetetaan sängylle.

3. Käytä tarvittaessa vuodesuojaa

Runsaasti kastelevan tai hikeä erittävän potilaan vuode tulee suojata vuodesuojalla.

Silvosan-hygianiapäällisen pesu ja desinfektio

Desinfektiossa suositellaan käytettäväksi seuraavia, Suomessa eniten käytettyjä desinfektioaineita:

- Klooria 300 - 5000 ppm (Kloramin)
- Erisa Oxy 2 % (Vetyperoksidi ja peretikkahappo)
- Easydes 100 % (Etanoli, kvanternäärinen ammoniumyhdiste, alkyyliamiini)
- Erisan Des 2 % (Kvanternäärinen ammoniumyhdiste, alkyyliammiini, fenoksietanoli)

Neste, kosteus ja eritetahrat tulee puhdistaa viipymättä.

Peruspuhdistus

Pintapyyhintä yleispuhdistusaineella ja lisäksi aika-ajoin pyyhintä puhtaalla vedellä, jolloin pesuainejäämät saadaan pois tai vaihtoehtoisesti koneellinen pesu.

KÄÄNNÄ!



Eritepuhdistus

1-vaiheinen eritetahrapuhdistus

- Pintapyyhintä 1000 - 2000 ppm (klorin) jonka jälkeen puhdistus yleispuhdistusaineella
- Paikallisesti voidaan pyyhkiä 5000 ppm (klorin) jonka jälkeen pyyhintä yleispuhdistusaineella tai puhtaalla vedellä tai vaihtoehtoisesti koneellinen pesu.

2-vaiheinen eritetahrapuhdistus

- Eritteen imeytys paperiin tai kertakäyttöliinaan, jonka jälkeen pintapyyhintä 500-1000 ppm klorin liuoksella, jonka jälkeen pyyhintä yleispuhdistusaineella tai puhtaalla vedellä tai vaihtoehtoisesti koneellinen pesu.

Erityispuhdistus


Suosittelaaan päällisen koneellista pesua 75 asteessa ja riippukuivatusta.
Jos päällinen pyyhittään ennen pesua tulee pyyhintä toteuttaa eritetahradesinfointina.

Patjan käyttö oikein päin


Alla olevista kuvista näet, miten päin patjan sisus on oikein päin. Nuolen osoittama puoli asetetaan yläpuolelle.



EX-hygieniapatja

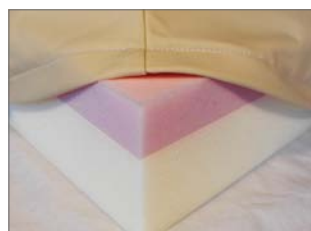

AD-standardipatja

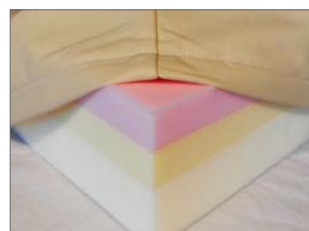

AD-patja



AD-MAX-patja