

AD-jalkatukityyny

Tyyny, joka tukee jalan kohoasentoa turvallisesti ja mukavasti

Duqem-jalkatukityyny on tarkoitettu tukemaan jalan kohoasentoa.

Tyyny on tukevaa kimmovaahtoa ja nopeasti kehon lämpöön ja painoon reagoivaa viskoelastista vaahtomuovia.

Eritteitä läpäisemätön ja hengittävä hygieniapäällinen on irrotettavissa pesua varten.

Kotimaista laatua yhdistettynä potilasturvallisuuteen.



Duqem®

Erityisominaisuudet

- Pehmeä viskoelastinen vaahtomuovi antaa hyvät antidecubitus-ominaisuudet
- Liukumattoman pintakankaan avulla tyyny pysyy hyvin paikoillaan
- Eritteitä läpäisemätön, hiostamaton ja hengittävä kangas
- Reagoi kehon lämpöön ja painoon
- Sopii koti- ja laitospöytäkäyttöön

Päällinen

Duqem-hygieniapäällinen on valmistettu ihoystävällisestä kankaasta, jossa on antibakteerisia ainesosia. Vetoketjua peittää tippasuojia.

Hoito-ohjeet

- Pintapyyhintä tarvittaessa neutraaleilla tai antiseptisilla puhdistusaineilla
- Päällinen irrotetaan pesua varten
- Päällinen kestää hyvin konepesua (max 75 °C)
- Ei linkousta, riippukuivatus
- Eritetahradesinfektio
 - Klooriliuos 500-2000 ppm (max 5000 ppm)
 - Etanolipohjaiset desinfektioaineet
 - Kvaternääriset ammoniumyhdisteet (2%)
 - Lämpödesinfektio max 85 °C
- Duqem-istuintyynyn kanssa käytettävä aina hygieniapäällistä
- Tyynyn sisustaa ei suositella pestäväksi

Tyynyn koko

Leveys cm	Pituus cm	Paksuus cm
70	40	30

Tyynyn rakenne



Viskoelastinen ja korkeakimmoinen vaahtomuovi

- Riittävä ja tukeva kohoasento yhdelle jalalle
- Ennaltaehkäisee paine- ja haavojen syntyä mm. kantapäiden alueelle
- Stabiloi alaraajaturvotuksia

Paloturvallisuus

SFS-EN 1021:2006, SL 1

Standardit

